

VIDEO GAFAS PARA FUTURE-1

¡¡¡Evite los reflejos de luz en sus ecografías!!!

DG-545

Imprescindibles
para ecografías
en el campo o
en días soleados



Excelente
calidad de
imagen

Prácticas

Cómodas

Ligeras

De fácil uso



inserbo.com



VIDEO GAFAS PARA FUTURE-1

¡¡¡Evite los reflejos de luz en sus ecografías!!!



- 1.- Vídeo gafas para ecógrafo FUTURE-1
- 2.- Convertidor / Batería
- 3.- Cable USB para cargar la batería en un PC
- 4.- Cable A/V. Cable con 3 conectores hembra RCA (Blanco, Amarillo y Rojo)
- 5.- Cable para utilizar las vídeo gafas en una iPod (Cable con 2 clavijas: una negra y otra blanca)
- 6.- Cargador entrada corriente 110/240V (Para cargar la batería en la red eléctrica)
- 7.- Cable de vídeo RCA macho / RCA macho (Para conectar las vídeo gafas al ecógrafo)

OBSERVACIONES

Los accesorios 3 y 5 son prescindibles. Podemos utilizar las vídeo gafas en el ecógrafo sin ellos.

INTRUCCIONES DE USO

- Cargue la batería en la red eléctrica utilizando el cargador (fig. 6) o a través de un PC utilizando el cable con conector USB (fig. 3)
- Conecte el cable A/V (fig. 4) al conector AV/IN de la batería
- Conecte las vídeo gafas al conector HMD de la batería
- Conecte un extremo del cable de vídeo (fig. 7) al conector "Amarillo" RCA hembra del cable A/V (fig. 4) que ya hemos conectado a la batería y el otro extremo a la salida VIDEO OUT del ecógrafo FUTURE-1
- Encienda las vídeo gafas pulsando el botón ON de la batería
- Encienda el ecógrafo FUTURE-1 pulsando el botón ON del equipo

OBSERVACIONES

Asegúrese de que todos los conectores están bien conectados y apretados para una óptima visión antes de poner en funcionamiento los equipos

inserbo.com

