



**MATERIAL GANADERO – INSTRUMENTAL VETERINARIO
VETERINARY AND STOCK INSTRUMENTS**

**MATERIAL PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA Y CUNÍCOLA
PORCINE AND RABBIT ARTIFICIAL INSEMINATION MATERIALS**

Polígono Industrial Torrefarrera – C/.Ponent, s/n.
Tel. 973 750 313 – Fax 973 751 772
Tel. EXPORT (34) 973 750 313
Fax EXPORT (34) 973 751 772
25123 TORREFARRERA
Lleida (SPAIN)

e-mail: starvet@inserbo.com
www.inserbo.com

Ficha técnica

IA-625A

Toallitas desinfectantes para la higiene de cerdas

PRESENTACIÓN

Cubo de plástico sellado hermético con 800 unidades de toallitas pre-cortadas a 240x200mm, realizadas en tejido no tejido e impregnadas en solución acuosa.

COMPOSICIÓN

Solución acuosa detergente de clorhexidina digluconato al 0.5%

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar a una temperatura de entre 5-25°C y con la humedad relativa no superior al 75%

USO

Es aconsejable el uso de las toallitas húmedas para limpiar y desinfectar la vagina de las cerdas en la realización de la I.A. (inseminación artificial) antes de introducir el catéter para inseminar, ya que de ese modo evitamos arrastrar suciedad hacia el interior de la vagina de la cerda, reduciendo muy considerablemente el riesgo de entrada de bacterias, con lo que evitamos posibles problemas posteriores de cerdas sucias etc...

PARTICULARIDADES

Gran resistencia por estar realizadas en tejido no tejido y no con papel como la gran mayoría que se suelen encontrar en el mercado.

No son espermicidas

Evitan producir heridas como pudiera suceder si se usase papel seco o un trapo ya que la zona a aplicar es sensible.



PARA USO VETERINARIO